



Guía rápida para la colocación de MAPA Schiller BR-102 plus

COLOCACIÓN DEL MAPA

1.- Colocar manguito de presión arterial haciendo coincidir la señal "ARTERY" con el pulso de la arteria braquial izquierda, unos 2 cm por encima del pliegue del codo de tal forma que permita flexionar el brazo al paciente. Explicar al paciente que cuando note que el manguito se infla, extienda el brazo para evitar interferencias.

2.- Compruebe que el manguito se encuentra conectado correctamente a la grabadora.

3.- Presione la tecla verde durante unos segundos hasta que se encienda la grabadora.

4.- Presione la tecla azul (ACEPTAR).

5.- En la pantalla aparece: **A**

6.- Presione la tecla azul (ACEPTAR: Comenzar regist).

7.- En la pantalla aparece: **B**

8.- Presione la tecla azul (ACEPTAR: ID de paciente).

9.- En la pantalla aparece: **C**

10.- Presione la tecla azul (ACEPTAR: Registro de voz).

11.- En la pantalla aparece: **D**

12.- Presione la tecla azul (INICIAR).

13.- Identificar al paciente, dispone de 30 segundos para ello.

14.- Una vez terminada la identificación del paciente, Presione la tecla azul (DETENER)

15.- Puede comprobar si la identificación del paciente es correcta pulsando la tecla azul (ACEPTAR) en REPRODUCIR VOZ. **E**

Si no es correcta, vuelva al paso 8. Si es correcta pulse la tecla verde (SEGUIR) hasta llegar a ATRÁS y pulse la tecla azul (ACEPTAR). **F**

16.- Presione la tecla verde en dos ocasiones (SEGUIR, hasta llegar a COMENZAR). **G**

17.- Presione la tecla azul (ACEPTAR).

18.- En la pantalla aparece ¿Desea comenzar un registro de BP?. **H**

19.- Presione la tecla azul (Sí).

20.- El aparato comienza a realizar tomas automáticamente, comprobar que no existe ningún problema en la toma. **I**

RETIRAR EL MAPA

1.- Si está tomando una medida, esperar a que termine de realizarla.

2.- Después, mantener pulsada la tecla verde durante unos segundos, hasta que desaparezca: ¿Desea detener el registro de PA?. **J**

3.- Pulse azul (SI).

4.- Aparecerá en la pantalla: Deteniendo el registro de PA. **K**

5.- Vuelva a pulsar la tecla azul (ACEPTAR).

6.- Presione la tecla verde durante unos segundos, la pantalla se apagará.

7.- Retire el manguito del paciente y envíe el MAPA para obtener resultados.

21:37

▶ COMENZAR REGIST
MOSTRAR RESULT.
UNA MEDICIÓN
CONFIG. SISTEMA

A SEGUIR ACEPTAR

COMENZAR REGIST
ADULT /24h/\ 2
▶ ID DE PACIENTE
Programa A
COMENZAR
CONFIG. REGISTR
ATRÁS

B SEGUIR ACEPTAR

ID DE PACIENTE
▶ REGISTRO DE VOZ
REPRODUCIR VOZ
ATRÁS

C SEGUIR ACEPTAR

ID DE PACIENTE
Registrando voz
(max. 30 seg.)
Hablar tras
pulsar Comenzar

D ATRÁS INICIAR

ID DE PACIENTE
▶ REGISTRO DE VOZ
REPRODUCIR VOZ
ATRÁS

E SEGUIR ACEPTAR

COMENZAR REGIST
ADULT /24h/\ 2
▶ ID DE PACIENTE
Programa A
COMENZAR
CONFIG. REGISTR
ATRÁS

F SEGUIR ACEPTAR

COMENZAR REGIST
ADULT /24h/\ 2
ID DE PACIENTE
Programa A
▶ COMENZAR
CONFIG. REGISTR
ATRÁS

G SEGUIR ACEPTAR

COMENZAR REGIST
¿Desea
comenzar un
registro de BP?

H NO SI

MEDICIÓN DE PA
Presión manguito
0 mmHg

I PAUSA

DETENER REGISTRO
¿Desea
detener el
registro de PA?

J NO SI

DETENER REGISTRO
Deteniendo el
registro de PA

K ACEPTAR